

## Douchekruk / Shower stool / Duschhocker

### 🇳🇱 Onderdelen:


- Zitting (A)
- Onderstel met U-vormig middenpunt (B)
- Onderstel met bolvormig middenpunt (C)
- 4x verstelbare poot (D)
- 5x schroeven (E)
- 5x ringetjes (F)

### ⚙️ Parts:

- Seat (A)
- Underframe with U-shaped centre point (B)
- Underframe with spherical centre point (C)
- 4x adjustable leg (D)
- 5x screw (E)
- 5x ring (F)

### 🇩🇪 Teile:

- Sitz (A)
- Sockel mit U-förmigem Mittelpunkt (B)
- Sockel mit kugelförmigem Mittelpunkt (C)
- 4x verstellbarer Fuß (D)
- 5x Schrauben (E)
- 5x Unterlegscheiben (F)

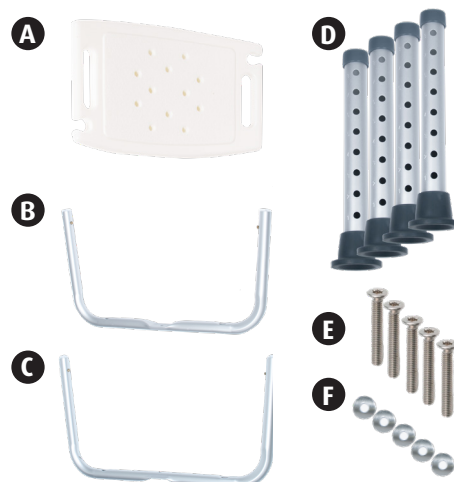

### 1 Step 1: Montage onderstel / Step 1: Mounting the underframe / Schritt 1: Montage des Sockels

- 🇳🇱 Leg de zitting (A) onderste boven op de grond. Plaats onderstel met U-vormige buis (B) schuin op de zitting in de daarvoor bedoelde uitsparing. Maak nog niets vast, en ga naar stap 2.
- ⚙️ Place seat (A) bottom up on the floor. Place the underframe with U-shaped centre point (B) at an angle to the seat in the recess provided. Do not fasten anything yet, and go to step 2.
- 🇩🇪 Legen Sie den Sitz (A) mit der Unterseite nach oben auf den Boden. Setzen Sie den Sockel mit dem U-förmigen Mittelpunkt (B) schräg zum Sitz in die vorgesehene Aussparung. Befestigen Sie noch nichts, sondern fahren Sie mit Schritt 2 fort.



### 2 Step 2: Montage onderstel / Step 2: Mounting the underframe / Schritt 2: Montage des Sockels

- 🇳🇱 Plaats het onderstel met bolvormig middenpunt (C) dwars over het eerste onderstel (B). Doordat beide onderstellen een inkeping bevatten, vallen de buizen netjes in elkaar. Bevestig vervolgens eerst de schroef (E) met ringetje (F) in het middelpunt. Bevestig daarna (stevig) de overgebleven 4 schroeven met ringetjes aan de zijkanten.
- ⚙️ Place the underframe with spherical centre point (C) crosswise over the first underframe (B). As both frames contain a notch, the tubes fit neatly together. Then first fix the screw (E) with ring (F) in the centre point. Then attach (firmly) the remaining 4 screws with rings on the sides.
- 🇩🇪 Legen Sie das Sockel mit kugelförmigem Mittelpunkt (C) quer über das erste Untergestell (B). Da beide Untergestelle eine Aussparung haben, passen die Rohre gut zusammen. Befestigen Sie dann zuerst die Schraube (E) mit Unterlegscheibe (F) in der Mitte. Dann befestigen Sie die restlichen 4 Schrauben mit Unterlegscheiben an den Seiten.



### 3 Step 3: Poten bevestigen / Step 3: Attaching legs / Schritt 3: Befestigen der Beine

- 🇳🇱 Plaats de 4 poten (D) op de buizen. Laat het zilveren pinnetje door het gewenste gaatje gaan zodat u de juiste hoogte bereikt. Het is belangrijk dat elke pin op dezelfde hoogte zit bij alle 4 de poten.
- ⚙️ Place the 4 legs (D) on the tubes. Pass the silver pin through the desired hole so that you reach the correct height. It is important that each pin is at the same height with all 4 legs.
- 🇩🇪 Setzen Sie die 4 Beine (D) auf die Rohre. Führen Sie den silbernen Stift durch das gewünschte Loch, so dass Sie die richtige Höhe erreichen. Es ist wichtig, dass sich jeder Stift bei allen 4 Beinen auf der gleichen Höhe befindet.



### 4 Step 4: Afronding / Step 4: Completion / Schritt 4: Fertigstellung

- 🇳🇱 Wanneer de 4 poten zijn bevestigd op de juiste hoogte is de Dunimed douchekruk klaar voor gebruik.
- ⚙️ When the 4 legs are fixed at the correct height, the Dunimed shower stool is ready for use.
- 🇩🇪 Wenn die 4 Beine in der richtigen Höhe befestigt sind, ist der Dunimed Duschhocker einsatzbereit.

