


تحتوي حقيبة أخذ العينات على:

- A أنبوب اختبار مع شفرة خطية/باركود. تحقق من صحة الرقم الشخصي الموجود على الشفرة الخطية/الباركود.
B العبوة مع محلول ملحي.
C مسحة قطنية/عواد أخذ العينات لاستخدامها أثناء أخذ العينات.
D كوب للبصق.
E مادة ماصة (لا تستخدم أثناء أخذ العينات، يجب وضعها في كيس صغير (G) بعد أخذ العينات).
F إرشادات أخذ العينات (هذه الورقة).
G كيس صغير. يحتوي على مادة ماصة لا يتم استخدامها أثناء أخذ العينات، ويجب وضعها فقط في كيس صغير (G) بعد أخذ العينات.
H كيس كبير (لوضع المسحات المستخدمة وغيرها بها).

تعليمات لأخذ العينات ذاتياً من الأنف، الحلق واللعاب

إن هذه التعليمات مخصصة لأخذ العينات ذاتياً ولكن إذا لزم الأمر، يمكن للوالدين أيضاً إجراء أخذ العينات لأطفالهم.

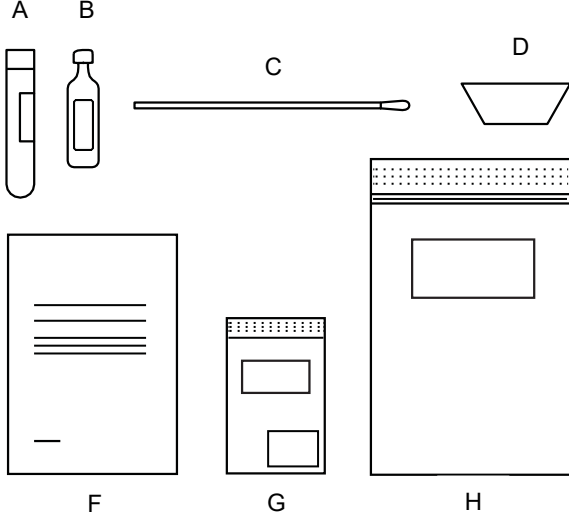

LABS


انظر إلى جدول المحتويات الذي يحتوي على مواد أخذ العينات مع العلامات في الصفحة التالية.
يرجى قراءة جدول المحتويات وإرشادات أخذ العينات أدناه بعناية قبل البدء في أخذ العينات.

1

التحضير لأخذ العينات

إذا كان الطفل سيخضع للاختبار، فإننا نوصي الأب/الأم باتباع التعليمات مع طفلهم.
إذا لزم الأمر، يمكن للأب/الأم القيام بأخذ العينات من الطفل.

1. أخرج الكيس الصغير (G) وضعه بجانبك. ضع باقي محتويات الكيس الكبير (H) على الكيس الصغير (G). افتح عبوة الماسحات (C).
2. خذ عبوة المحلول الملحي (B) وافتحها عن طريق لف الغطاء.
3. قم بإزالة الغطاء من أنبوب العينة (A) وضع الغطاء على ظهره بحيث يكون السن اللولبي متجه لأعلى.
4. قم بإفراغ المحلول الملحي (B) في أنبوب العينة (A). استمر بالإمساك بأنبوب العينة (A) تخلص من عبوة المحلول الملحي الفارغة في الكيس الكبير (H).
5. ستقوم الآن بإجراء ثلاث عينات وفقاً للإرشادات أدناه.

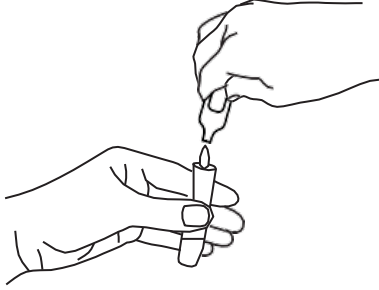

2

الحلق - أخذ العينة 1

1. خذ الماسحة (C) وأدخلها على طول الخد إلى أسفل نحو الحلق بقدر ما تستطيع.
2. اكشط بالرأس القطني لمدة 20 ثانية على كل جانب داخل الحلق.
3. أخرج الماسحة (C) من الحلق.

20 ثانية



3

الأنف - أخذ العينة 2

4. قم بإدخال الماسحة ذات الرأس القطني الآن بمحاذاة جدار الأنف بطول 2 - 3 سم. أكشط لمدة 20 ثانية. قم بفعل الشيء نفسه في كلا فتحتي الأنف بنفس الماسحة.
5. أخرج الماسحة (C) من الأنف وامسك الماسحة (C) بنفس اليد التي تمسك بها أنبوب العينة (A).

20 ثانية



4

اللعاب - أخذ العينة 3

1. أخرج كوب البصق (D) وابصق عدة مرات حتى يتم تغطية السطح السفلي بشكل صحيح.
2. خذ الماسحة (C) وحركها في اللعاب لمدة 20 ثانية.
3. أدخل الرأس القطني للماسحة (C) في أنبوب العينة (A) وقم بالتحريك لمدة 20 ثانية تقريباً. قم بإزالة الماسحة من أنبوب العينة.
4. تخلص من الماسحة (C) وكوب البصق (D) عن طريق وضعهم في الكيس الكبير (H).
5. قم بلف غطاء أنبوب العينة (A) ليتم إغلاق الأنبوب بشكل جيد. تحقق مرة أخرى من بقاء السائل في أنبوب العينة وأن الغطاء موضوع بإحكام. ضع أنبوب العينة (A) في الكيس الصغير (G).
يحتوي الكيس على مادة ماصة يجب تركها دون مساس.

20 ثانية



بعد أخذ العينات

قم بتسليم الكيس الصغير (G) بالطريقة وفي المكان الذي تم إخطارك به عند الحجز.
تخلص من الكيس الكبير (H) الذي يحتوي على الماسحات، وكوب البصق، وبقية القمامة في النفايات المنزلية.

